


EMERQUICK PRO


エマーquick・プロ

組立方法

開梱状態

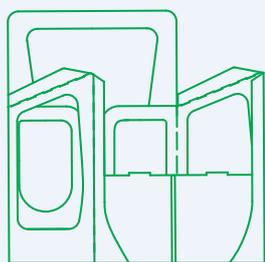


① 広げて底を組立てます

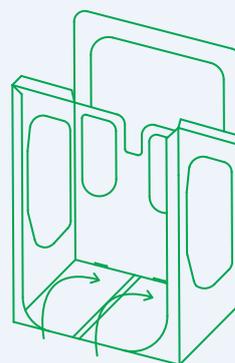


② 内側に倒してロックをします

組立完成図

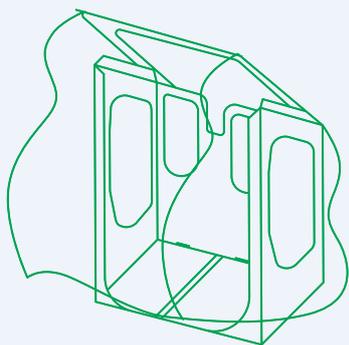

③ 天面のビニールを延ばして被せます

処分手順

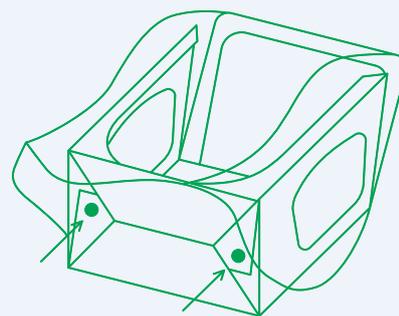

横に倒して底面の印のある2か所を外側から押上げて畳み、内側に触れないように注意して廃棄して下さい

【材 質】 本体:段ボール 窓:ポリプロピレン フロントカバー:ポリプロピレン

【重 量】 450g/枚

【本体サイズ】 折りたたみ時 W:480mm D:40mm H:550mm

組立時 W:480mm D:260mm H:550mm

EMERQUICK PRO
エマーquick・プロ

! 重要


本製品は微細な粉塵や水滴などから眼、身体をできるだけ保護することを目的としています。使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

! 安全上の注意

- 本製品は単回使用で、**使い捨て**です。毎回新しいものをご使用ください。
- 本製品は窓に体液や汚れ等が付着すると視界をさえぎられ、安全の妨げになりますので、新しいものをご使用ください。
- 本製品は素材の特性上、鋭利なものや無理な力によって破れが生じる場合があります。破れがある場合は、ご使用を中止し、新しいものをご使用ください。
- 本製品は **滅菌されていません**。水や薬品、及び熱や圧力を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないでください。
- 本製品は高温処理（60℃以上5分）による殺虫処理を行っております。
- ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですで行わないでください。

! 取扱上の注意

- ストーブなどの熱や火気のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 水気を含んだもので拭いたり、水のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 高温多湿及び直射日光を避けて保管ください。
- 変質・変色がある場合は、ご使用を控えてください。
- 個装袋は大変破れやすくなっております。取扱いにはご注意ください。

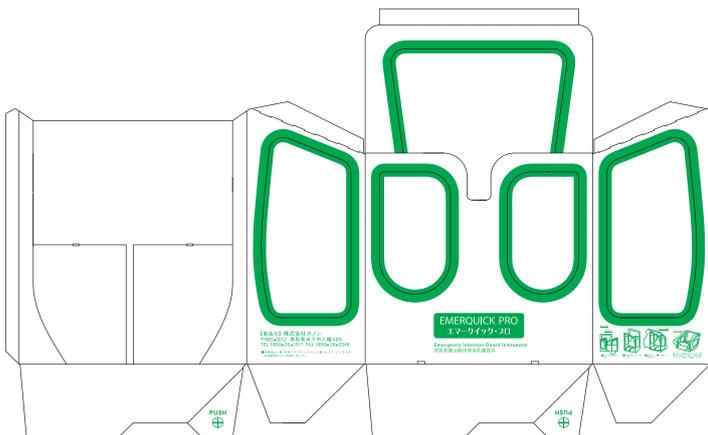

*製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

【販売店】株式会社カノン
・各消防用品取扱店
・医療器販売店

【製造元】株式会社カノン
〒683-0012 鳥取県米子市八幡495
TEL:0859-26-1517 FAX:0859-26-3346

●本製品は、(株)日本マイクロシステム、(株)カノン、ニシモトの共同研究により完成しました。